

# TABLETAS LIMPIADORAS DE PROTESIS DENTALES



# QUIEN NECESITA ESTE PRODUCTO?



El uso del limpiador de prótesis dentales ayuda a remover tanto las manchas como las partículas causantes del mal olor que los cepillos de dientes no alcanzan a limpiar.

Igual que los dientes naturales, las dentaduras deben limpiarse diariamente.

# CÓMO SE USA EL PRODUCTO?

Deposite una tableta en un vaso con agua tibia y el efecto efervescente se encargará de realizar todo el trabajo. En tan solo 3 minutos puede sonreír y lucir unos dientes blancos perfectos.

“Nada es más importante que su dentadura, así no sea la original.”



# FUNCIONA PARA:




- Dentaduras
- Parciales
- Retenedores

El efecto efervescente mejora la efectividad y simplifica el proceso de limpieza para los consumidores.




La efervescencia bi-capa provee una liberación de los ingredientes de forma gradual y prolongada haciendo que el producto sea más eficiente que una tableta regular.

Una capa es liberada de forma inmediata como dosis inicial, y la segunda capa es una dosis de mantenimiento que prolongo el efecto eferevescente.

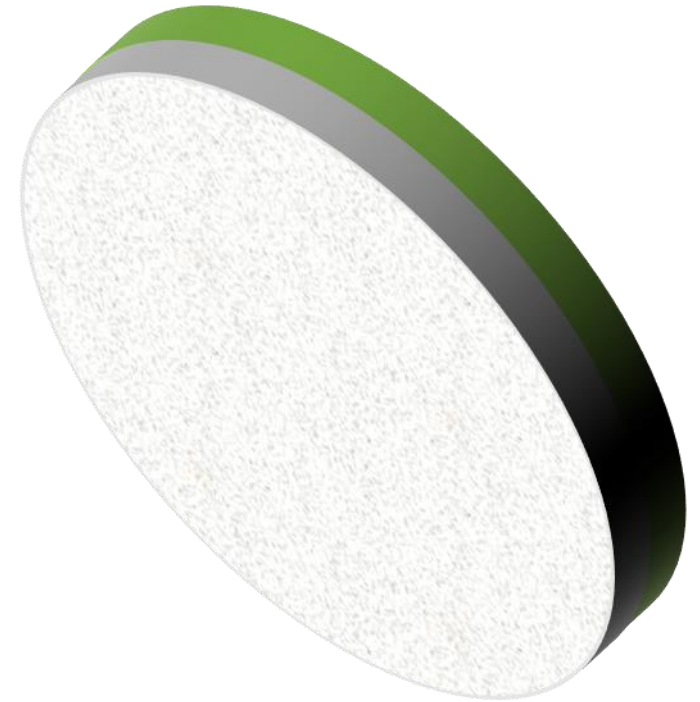


- Disuelve las manchas en lugares difíciles de alcanzar, incluso entre los dientes.
- Reduce la acumulación de placa y remueve las partículas de alimento que causan la irritación de las encías y el mal olor.
- Mantiene las dentaduras y aparatos odontológicos frescos y limpios.

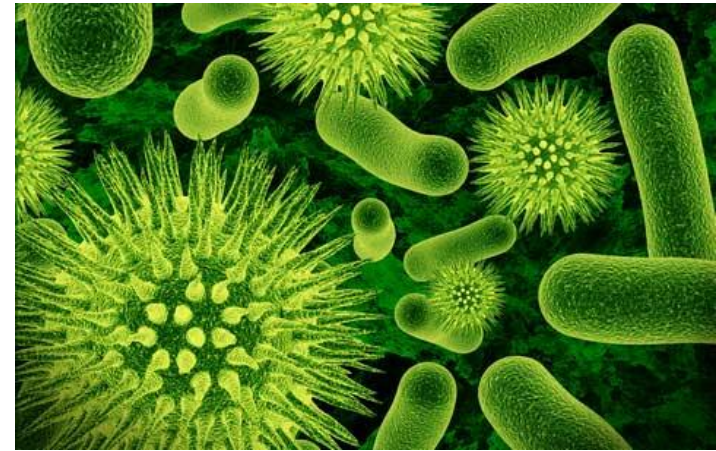

# CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto está clasificado como un dispositivo médico clase 1 por las autoridades Europeas de la marca CE

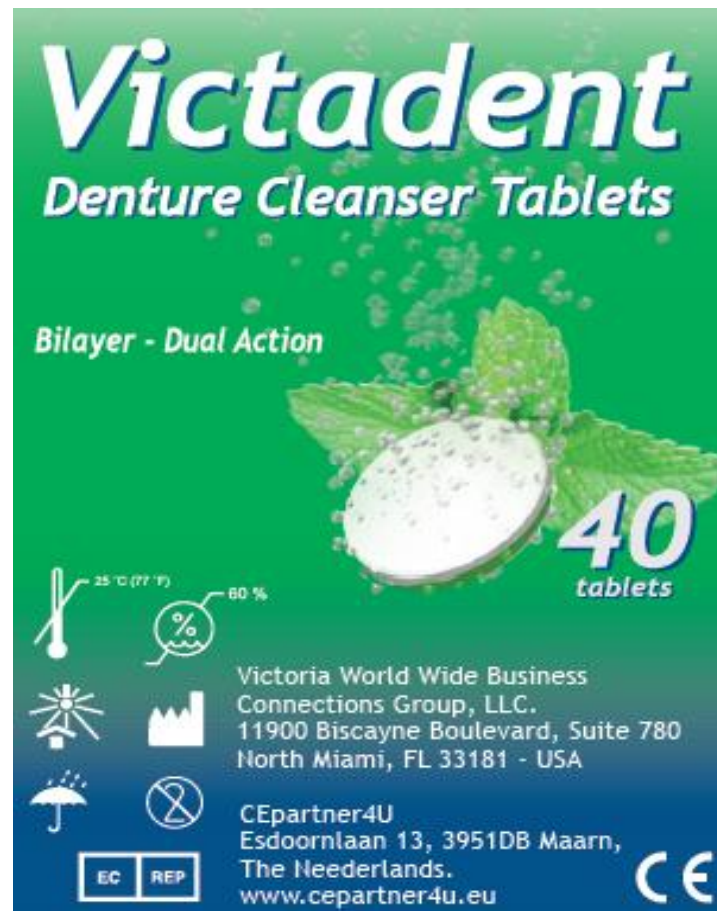



Producto	Apariencia	Indicaciones	Usos	Direcciones
Tabletas efervescentes bicapa	Bicapa verde/blanco	Para limpieza efervescente y desodorizante de dentaduras, cajas de dientes y aparatos odontológicos	Remueve bacterias, limpia en solo 3 minutos.	<p>Poner una tableta del producto en agua tibia, usar suficiente agua para cubrir la dentadura en su totalidad.</p> <p>Inmediatamente introducir la dentadura en la solución verde.</p> <p>Dejarla sumergida en la solución al menos 3 minutos. Para mejores resultados cepille la dentadura usando la solución.</p> <p>Es seguro dejar la dentadura sumergida durante toda la noche.</p> <p>Lave y enjuague la dentadura con agua limpia.</p>

# FUNCIÓN DE LOS INGREDIENTES

## EFERVESCENTE:

- Bicarbonato de sodio
  - Acido cítrico
- 

## OXIDANTES:

- Percarbonato de sodio
  - Persulfato de potasio
  - TAED
- 

## DETERGENTES:


- Sulfato de sodio
- Lauril sulfoacetato de sodio
- Carbonato de Sodio

Provee una acción de limpieza mecánica que ayuda a aflojar las partículas de la dentadura.

Reduce el olor neutralizando los subproductos de las bacterias.



Limpia al remover virtualmente todas las partículas que han sido aflojadas y removidas por los ingredientes activos.

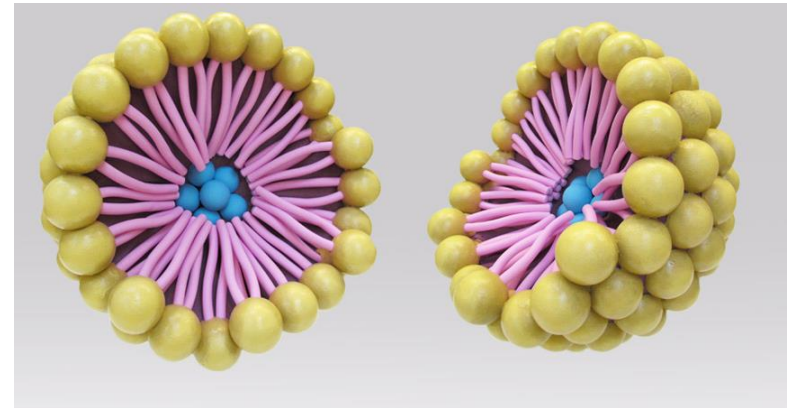

Actúan como agentes blanqueadores removiendo las manchas de las dentaduras.





**3 años**

**Victoria World Wide Business Connections Group, LLC.  
Dr. Tevsijk Group, LLC.**

5801 NW 151<sup>st</sup> ST, Suite 203, Miami Lakes, FL 33014  
USA

Teléfono: 1-305-895-7077 / Fax: 1-305-895-7088

[info@vwwbc.com](mailto:info@vwwbc.com) / [info@drtevsijk.com](mailto:info@drtevsijk.com)  
[www.vwwbc.com](http://www.vwwbc.com)

